

Имеют напыление сухим гепарином лития, сбалансированным по кальцию

Оптимальная концентрация антикоагулянта и защита крови от контакта с воздухом уменьшают количество преаналитических ошибок

Различные размеры и типы шприцев полностью соответствуют вашим клиническим задачам

Снижают риск инфицирования при заборе и транспортировке крови



# ВСЕ СЛОЖИТСЯ ХОРОШО



**BD Preset™ и BD A-Line™**

**Система забора крови для анализа электролитов и газов**

# Все сложится хорошо

Различные объемы и типы шприцев BD –  
возможность использования различных методик  
для взятия необходимого объема артериальной крови


BD Preset™ – специально разработан для  
самозаполнения, но при необходимости  
возможно заполнение аспирационным  
способом

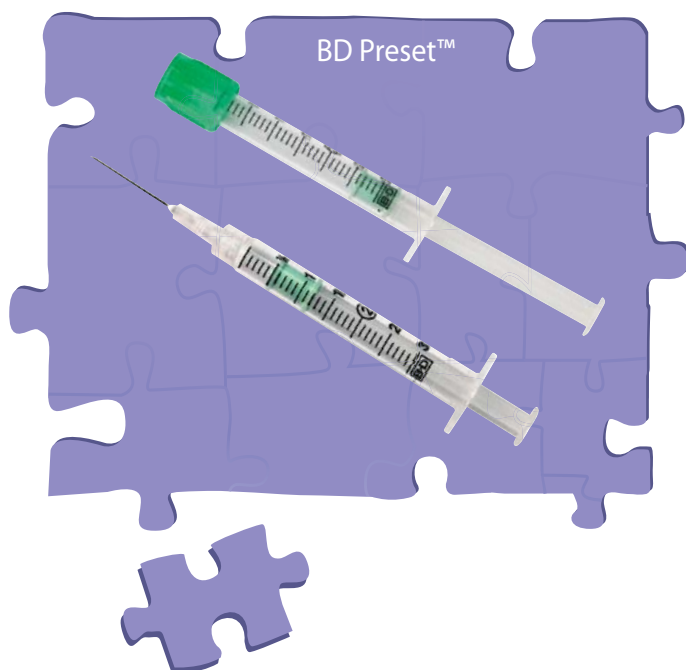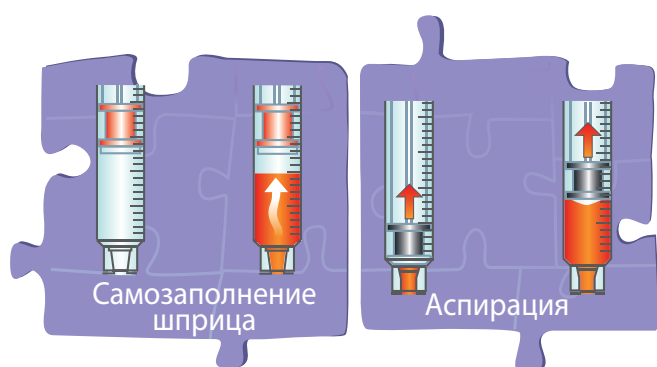

Поршень шприца устанавливается на уровне  
необходимого объема пробы. Во время заполнения  
шприца кровью остаточный воздух удаляется через  
мембрану в поршне шприца, которая автоматически  
закрывается после получения нужного объема.

Самозаполнение возможно только  
в шприцах BD Preset™

BD A-Line™ – предназначены для взятия  
артериальной крови аспирационным  
способом

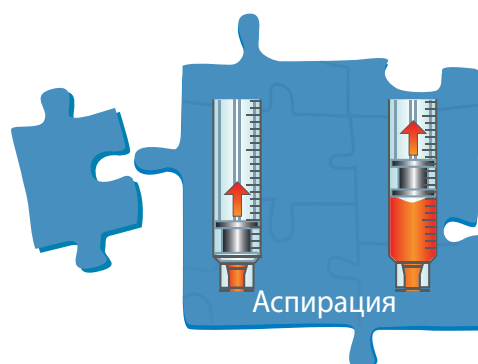

Поршень помещается в основание шприца.  
Образец набирается в шприц при вытягивании поршня.  
Такой способ возможен при использовании  
как шприцов BD A-Line™, так и BD Preset™


# Система забора крови для анализа электролитов и газов BD Preset™ и BD A-Line™

## ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИНФИЦИРОВАНИЯ


Все шприцы поставляются в индивидуальной стерильной упаковке  
и готовы к использованию



Игла BD Eclipse™  
снабжена специальным защитным  
колпачком для снижения риска  
случайного укола иглой

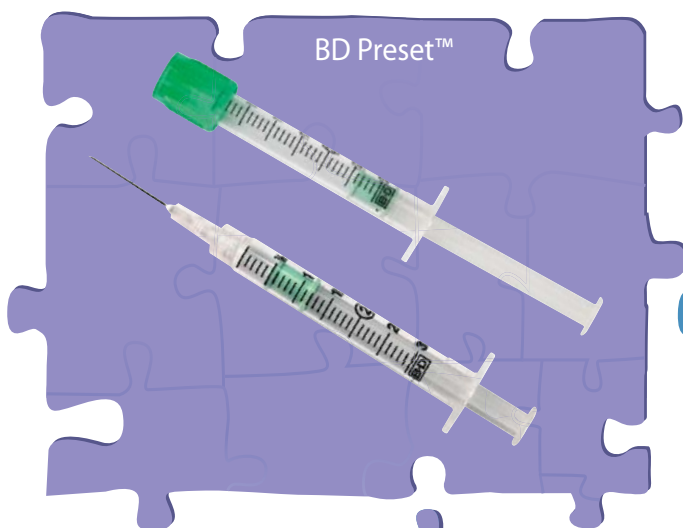

BD Preset™

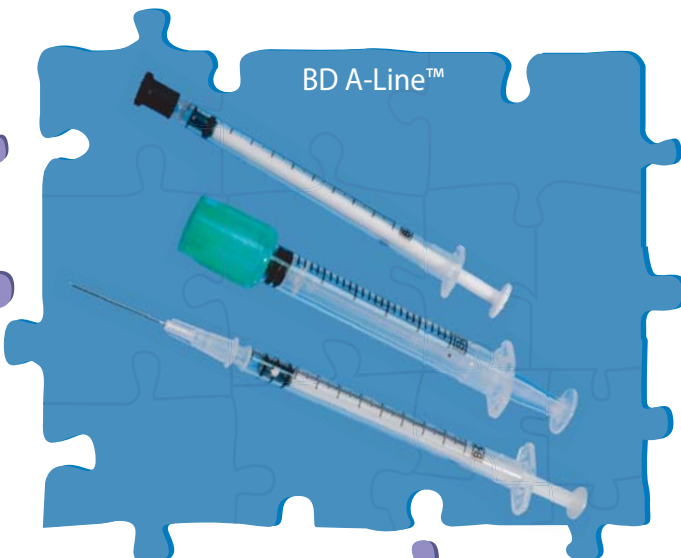

BD A-Line™


Крышка BD Hemogard™  
соединяется с креплением  
BD Luer-Lok™, предотвращает  
проливание крови и контакт  
пробы с воздухом, защищает  
от инфицирования при  
транспортировке пробы



Колпачок Slip Tip  
в шприцах без крепления  
BD Luer-Lok™ - защита  
от инфицирования при  
транспортировке пробы



Крепление BD Luer-Lok™ — плотное  
соединение шприца с катетером,  
иглой или крышкой BD Hemogard™,  
защищает от инфицирования при  
заборе и транспортировке пробы

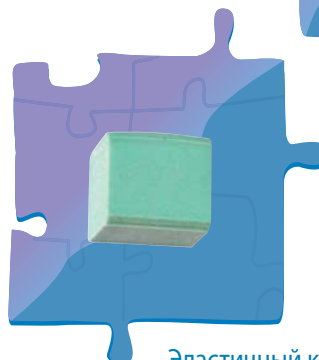

Эластичный кубик предназначен  
для герметизации иглы и защиты  
от инфицирования при  
транспортировке пробы

# Система забора крови для анализа электролитов и газов BD Preset™ и BD A-Line™



Кат. №	Описание	Объем (мл)	Упаковка
<b>BD A-Line™ Шприцы без игл для аспирационного взятия крови</b>			
364356	Шприц BD A-Line™ с защитным колпачком Slip Tip	1	100
364378	Шприц BD A-Line™ с креплением BD Luer-Lok™ и крышкой BD Hemogard™	3	100
364376	Шприц BD A-Line™ с защитным колпачком Slip Tip	3	100
<b>BD Preset™ Шприцы без игл для взятия крови самотеком или аспирационным способом</b>			
364416	Шприц BD Preset™ с защитным колпачком Slip Tip	1	100
364316	Шприц BD Preset™ с креплением BD Luer-Lok™ и крышкой BD Hemogard™	3	100
<b>BD Preset™ Шприцы с присоединенной иглой для взятия крови самотеком или аспирационным способом</b>			
364413	Шприц BD Preset™ с иглой 23Gx1" (0.6x25мм), с защитным колпачком Slip Tip	1	100
364415	Шприц BD Preset™ с иглой 25Gx5/8" (0.5x16мм), с защитным колпачком Slip Tip	1	100
364314	Шприц BD Preset™ с иглой 22G (0.7мм), креплением BD Luer-Lok™ и крышкой BD Hemogard™	3	100
364327	Шприц BD Preset™ с иглой 23G (0.6мм), креплением BD Luer-Lok™ и крышкой BD Hemogard™	3	100

## BD Eclipse™



Кат.№	Описание	Объем (мл)	Упаковка
364390	Шприц BD Preset™ с иглой BD Eclipse™ 22G (0.7мм), креплением BD Luer-Lok™ и крышкой BD Hemogard™	3	100
364391	Шприц BD Preset™ с иглой BD Eclipse™ 23G (0.6мм), креплением BD Luer-Lok™ и крышкой BD Hemogard™	3	100
364393	Шприц BD Preset™ с иглой BD Eclipse™ 25G (0.5мм), креплением BD Luer-Lok™ и крышкой BD Hemogard™	3	100

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
**BD Vacutainer®**  
8-800-200-80-40  
звонок бесплатный  
с 10.00 до 16.00 по московскому времени




**BD Diagnostics** – Preanalytical Systems  
123317 Москва, Краснопресненская наб., д. 18, блок С,  
тел. +7 495 775 85 82; факс +7 495 775 85 83  
телефон горячей линии: 8 800 200 80 40  
ema\_pas@europe.bd.com, www.bd.com